

# INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁU REHABILITACYJNEGO SKŁADANEGO

## MODEL AMBIENTE

### I. Dane techniczne:

Długość:	190cm
Szerokość:	68cm
Wysokość regulowana skokowo:	62cm-82cm
Dopuszczalne obciążenie:	300kg
Waga bez wyposażenia:	16kg
Panel podnoszony długość:	69cm
Kąt podnoszenia panelu:	0°-80°    dziesięć stopni regulacji

### II. Zastosowanie:

Stół rehabilitacyjny składany przeznaczony jest do zabiegów rehabilitacyjnych, masażu, zabiegów fizjoterapeutycznych, łagodzenia skutków urazów.


### III. Budowa:

1. Błat drewniany pokryty tapicerką	2 szt.
2. Nogi zewnętrzne	2 szt.
3. Rozpórki nóg zewnętrznych	2 szt.
4. Naciąg linkowy (system linek)	1 szt.
5. Klipsy	2 szt.
6. Uchwyty transportowe	2 szt.
7. Podglówek	1 szt.
8. Półka przednia	1 szt.
9. Nakrętka motylkowa	4 szt.
10. Noga ruchoma	4 szt.
11. Panel ruchomy	1 szt.

### IV. Obsługa:

Stół w stanie złożonym stanowi walizkę. Kolejność rozkładania stołu:

1. Otworzyć klipsy zamykające (5)
2. Odchylić blaty stołu (1)
3. Wyciągnąć wyposażenie z wnętrza stołu
4. Rozłożyć nogi maksymalnie na zewnątrz (2)
5. Ustawić stół na twardym i równym podłożu
6. Sprawdzić naciąg systemu linek (4)
7. Ustawić odpowiednią wysokość: w tym celu odkręcić nakrętkę motylkową (9), zdjąć nogę ruchomą (10) ze śruby mocującej, przełożyć nogę ruchomą w wybrane położenie i ponownie zakręcić nakrętkę motylkową wraz z podkładkami.
8. Podnieść półkę przednią (8) i zaczepić klipsami mocowania półki.
9. Dostawić podglówek (7)
10. W razie potrzeby podnieść panel ruchomy (11) na wybraną wysokość: panel podnosić chwytając za tylną część stołu na środku blatu. Mechanizm sam zablokuje się w wybranym położeniu. Aby zwolnić mechanizm należy podnieść panel ruchomy (11) do maksymalnej wysokości (do wyczuwalnego oporu) i opuścić. W maksymalnym położeniu mechanizm regulacyjny odblokowuje się.

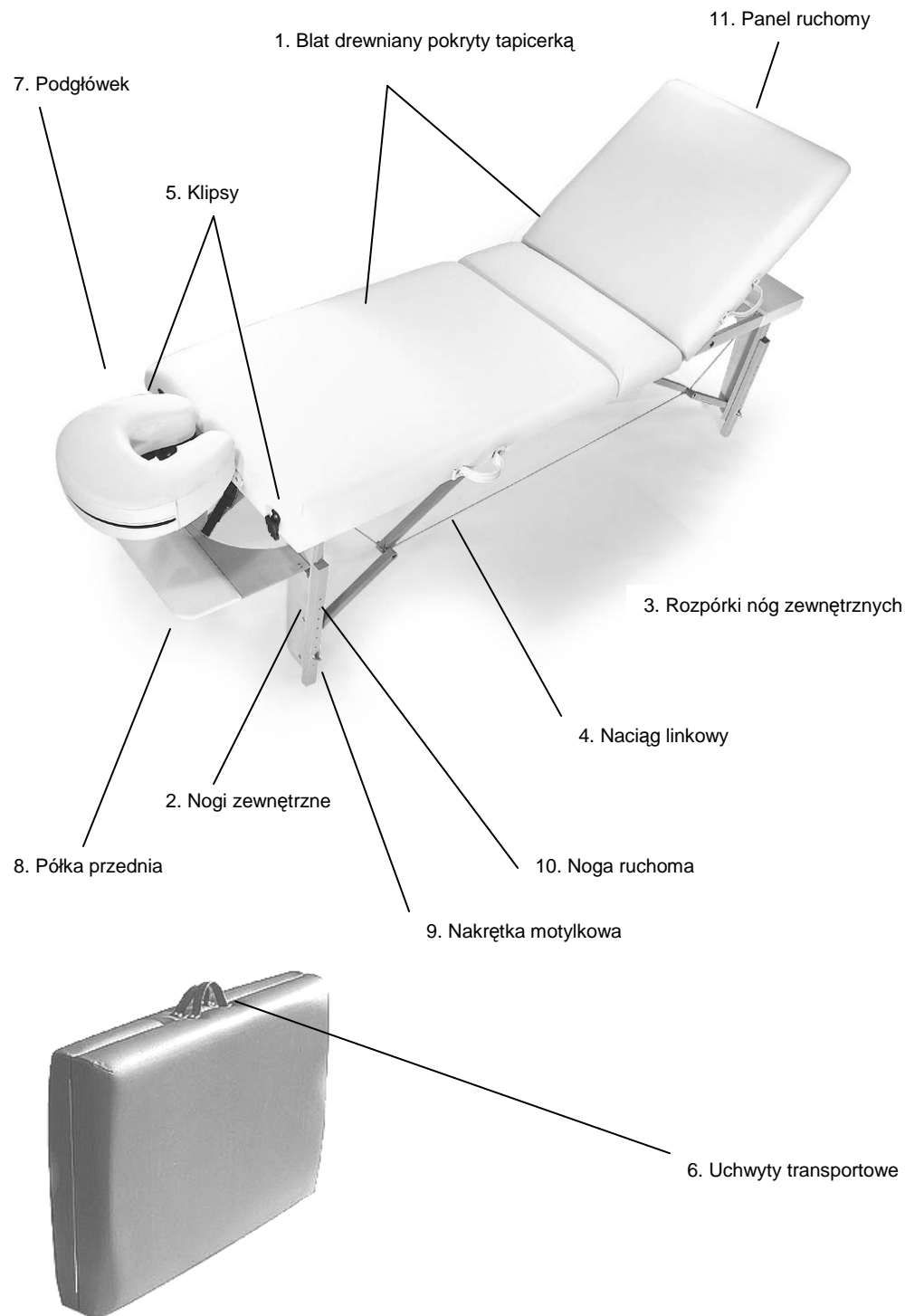

**Uwaga:** Przed położeniem pacjenta należy sprawdzić:

- prawidłowość rozstawienia nóg zewnętrznych
- stan techniczny linek i ich prawidłowy naciąg
- jednakowe ustawienie długości wszystkich czterech nóg

#### V. Ułożenie pacjenta:

Pacjent siada z boku na blat tapicerowany stołu i następnie przyjmuje dogodną mu pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuruje masażysta, pomagając pacjentowi właściwie ułożyć się na stole.

#### VI. Złożenie stołu:

1. Wymontować podgłówek, opuścić półkę przednią
2. Przetawić stół z pozycji pracy na jeden z boków
3. Złożyć nogi, podcinając rozpórki nóg zewnętrznych i zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie linek
4. Umieścić podgłówek wewnątrz stołu
5. Zamknąć walizkę klipsami zamykającymi

#### VII. Konserwacja:

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki stołu na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Stół może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

#### VIII. Uwagi eksploatacyjne:

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem
3. Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania)
4. Stół może być transportowany w stanie złożonym z zamkniętymi klipsami
5. Zabrania się siadania, klękania, opierania i odpychania przy wstawaniu od podgłówka oraz półki
7. Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół

## INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁU REHABILITACYJNEGO SKŁADANEGO

### MODEL AMBIENTE



**Unicorn s.c. ul. Grenady 49 43-344 Bielsko-Biała**

**tel. 012 357 55 44**



